

取扱説明書

STEP1: 皮膚のお手入れ

皮膚を清潔にし、油分を含んだクリーム等が付いていない状態にします。

気になる場合は体毛を処理して下さい。

STEP2: テープの準備

テープの裏地に切れ目を入れて片方をはがし、接着面の端から皮膚の上に置くように貼ります。もう片方の裏地もはがして、残りを貼ります。

STEP3: 適切に付着させる

泳いだり、シャワーを浴びる時はテープ貼付後、最低1時間経過してからして下さい。剥がしにくくなるためドライヤーは使用しないで下さい。テープの端が剥がれ始めたら、はさみで切り取ることでそれ以上剥がれにくくすることができます。

STEP4: 気になる箇所に貼る

従来のテーピングのように専門知識は必要ありません。無理な姿勢をとったりテープを引っ張る必要もありません。気になる箇所の近くに貼ることで、様々な効果が望めます。

STEP5: テープの取り外し

5日前後で、テープの粘着力が失われます。自然に剥れるため肌には負担がかかりません。早く剥がしたいときは、ベビーオイル等を使用すると簡単に剥がせます。

注意事項:

使用中に、発疹、かゆみなどの症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談下さい。

妊婦の方は、使用しないで下さい。

本製品の使用説明は独自の方法をご案内しております。使用例は治療例ではありません。

よくある質問

Q1: 効果はどのくらい持続しますか？

A: 通常、効果は5-7日持続します。皮膚の油分や汗、湿気などにより持続時間は前後します。

Q2: 貼る時にテープの引っ張り具合を調整する必要がありますか？

A: 必要ありません。皮膚の上に置くように貼って下さい。どなたでも簡単にご利用いただけます。

Q3: 薬を服用していますが、テープを使用できますか？

A: 使用できます。薬物相互作用はありません。ただし、この製品は医療措置に取って代わるものではありません。

Q4: 薬物検査を受けるアスリートです。ドーピングのリスクはありますか？

A: ドーピングリスクはありません。オリンピック競技者の薬物検査でも問題は起きていません。安心してご利用ください。

bolt tape の最新情報は公式 HP で QR コードからアクセス!
<https://www.bolttape-japan.com/>



背中 -BACK-



背中 -BACK-

